

# Extended RA641

## Strahlenschutz-Schürze RA641 – Der perfekte Schutz für sitzende Tätigkeiten

In Fachbereichen wie Urologie und Anästhesiologie sind Strahlenschutz-Schürzen unverzichtbar. Die meisten Schürzen sind jedoch für das Stehen gedacht. Die RA641 ist speziell für die Anforderungen im Sitzen entwickelt worden und bietet Ihnen optimalen Schutz und Komfort.

Entdecken Sie die Vorteile der RA641:

- ✓ **Optimierter Schutz für sitzende Tätigkeiten:** Diese Schürze bietet hervorragenden Schutz, auch wenn Sie sitzen. Die größeren Seitenflügel sorgen dafür, dass die Schürze auch bei Bewegungen gut in Position bleibt und ein Herunterrutschen von den Beinen verhindert wird.
- ✓ **Perfekte Passform und Komfort:** Die Schürze passt sich ideal Ihrem Körper an. Weiche Schulterpolster sorgen für zusätzlichen Komfort.
- ✓ **Flexible Verschlussoptionen:** Wählen Sie zwischen einem frontseitig zu schließenden Gurtband mit Schnappschnalle (serienmäßig) oder zwei Schnappschnallen im Rückenbereich (optional), um den Verschluss Ihren Bedürfnissen anzupassen.
- ✓ **Zertifizierter Schutz:** Baumusterprüfung und Zertifizierung gemäß (EU) 2016/425, (EU) 2017/745, IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016 und IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331-3:2016

### Schutz/Bleigleichwert Standard-Kollektion

NovaLite® Plus oder Leadfree 2.0



**Frontseitig:**  
0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb  
oder 0,50 mm Pb

**Rückseitig:**  
0,25 mm Pb (Standard)  
oder 0,00 mm Pb (optional)



Größen\*, empfohlen für:

XS	Brustumfang ≤ 84 cm	Taillen-/Hüftumfang ≤ 91 cm
S	Brustumfang ca. 85 - 95 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 92 - 102 cm
M	Brustumfang ca. 96 - 106 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 103 - 112 cm
L	Brustumfang ca. 107 - 117 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 113 - 123 cm
XL	Brustumfang ca. 118 - 128 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 124 - 134 cm
XXL	Brustumfang ca. 129 - 139 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 135 - 145 cm
3XL	Brustumfang ca. 140 - 150 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 146 - 156 cm

\* Für die Größe entscheidet entweder der Umfang der Brust, Taille oder Hüfte, abhängig davon, welches der drei Maße den größten Wert aufweist.



FRONTSCHUTZ

Wählen Sie die RA641 für sicheren Schutz und höchsten Komfort, speziell wenn es um sitzende Tätigkeiten geht.



RFID-Chip inklusive

## Besondere Merkmale

### I. Integrierter Gonadenschutz

Ein zusätzlicher Schutz auf der Innenseite schützt Ihre empfindlichen Bereiche.

### II. Innovativer, austauschbarer Gürtel

Der elastische, innenliegende Gürtel auf der Vorderseite stützt das Gewicht der Schürze auf Ihren Hüften ab und entlastet so Rücken und Schultern.

### III. Vollständiger Schutz im Stehen


Selbstverständlich bietet die RA641 bei richtiger Größe auch im Stehen vollständigen Schutz vom Hals bis unterhalb der Knie.

## Verschluss-Systeme

Beim Modell RA641 stehen Ihnen zwei unterschiedliche Varianten zum Schließen der Schürze zur Auswahl.



**Gurtbandverschluss mit Schnappverschluss**  
Serienmäßig, frontseitig.

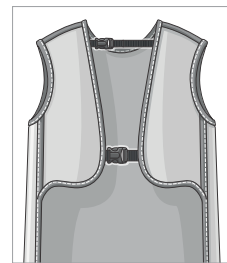

**Zweifacher Schnappverschluss**  
Optional, rückseitig.

### Abnehmbarer Gonadenschutz

Für die Gewichtsreduktion im Stehen kann der mit Klett adaptierte Gonadenschutz einfach abgenommen werden.

### Richtige Länge!

Für Arbeiten im Sitzen sollte die Schürze 10 cm länger gewählt werden, als es Ihrer Körpergröße entspricht, damit die Knie auch abgedeckt sind. (siehe hierzu: "Längen, empfohlene Körpergröße")

### Seitliche Flügel

Die seitlichen Flügel im unteren Bereich der Schürze können einfach rückseitig aneinander befestigt werden, sodass sie bei Bewegungen nicht stören und Sie uneingeschränkt arbeiten können.

### Stretchgürtel, austauschbar

Der frontseitig innenliegende, elastische Gürtel stützt den Großteil des Gewichts der Schürze auf den Hüften ab. Das entlastet den Rücken und die Schultern.



### Außenmaterial

Farben  
(siehe Frontseite)



Serienmäßig:  
ComforTex® HPMF Hybrid


### Größen

von XS bis 3XL  
(siehe Frontseite)



Länge / Körpergröße:  
90 cm / 150 - 160 cm  
100 cm / 160 - 170 cm  
110 cm / 170 - 180 cm  
120 cm / 175 - 190 cm  
130 cm / 185 - 195 cm  
140 cm / 195 - 205 cm

### Optional

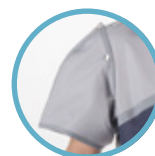

Auf Wunsch:  
Ärmel  
Brusttasche  
Stickerei  
Maßanfertigung

### Zubehör/Ersatz

Bolero  
Schilddrüsen-Sternumschutz



Innenliegender Gürtel  
(Adaption via Reißverschluss)  
Gonadenschutz  
(Adaption via Klettverschluss)